

BRUKSANVISNING HURTIGTEST

Utstyr (du ha fått utstyr til to tester i posen)


- Testpinne
- Brikke som vist på bilde, ligger oppi hvit emballasje
- Testglass med væske i bunn
- Blank kork til testglass



Video: <https://youtu.be/LDuslOf3Zo0>

Start med å pakk opp utstyret som medfølger i pose og legg ut på benk, ta ut brikke fra emballasje og legg klar. Åpne deretter testpinnen og utfør test.

- 1) Vend pasientens hode litt bakover
- 2) Vri testpinnen mens du fører den inn i neseboret , ca 2 cm inn fra kanten av neseboret
- 3) Roter testpinnen 4 ganger mot nesevegg en, utfør dette i begge nesebor.
- 4) Ta testpinnen oppi testglass, klem sammen testglasset i bunnen med pinnen. Og vri pinnen rundt minst 5 ganger.
- 5) Ta ut testpinnen samtidig som du klemmer på sidene av testglasset for å trekke ut væske fra test pinnen.
- 6) Sett godt på blank kork på testglass.
- 7) Forsiktig snu testglass. Hold det slik uten bevegelse i minst 30 sekunder.
- 8) Drypp forsiktig 4 dråper av innholdet i testglass over på dråpepunkt (rundt felt) på brikken.
- 9) Les av resultat etter 15-30 minutter .

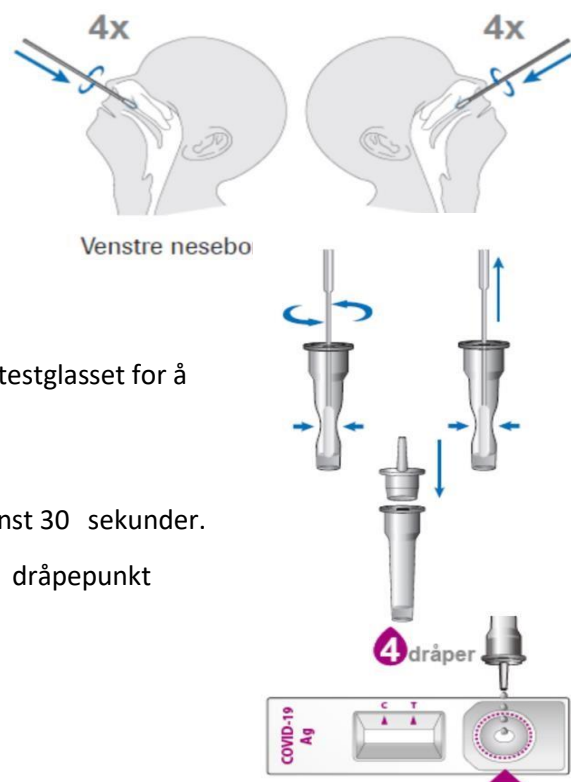

Positiv test

To fargede linjer vises. En linje i kontrollområdet (C) og en linje i testområdet (T). Enhver fargenyansse i testområdet skal vurderes som positiv.



Negativ test

Kun en farget linje i kontrollområdet (C).



Ugyldig test

Ingen farget linje i kontrollområdet (C). Testen skal i slike tilfeller gjentas med ny prøve og ny testkassett.

